

ACCELERATORE INVERTITO A SINISTRA

COD. NEW PASV



Il dispositivo NEW PASV permette di effettuare l'operazione di accelerazione usando l'arto inferiore sinistro, lasciando libero lo spazio per l'azionamento del pedale del freno e coprendo, per mezzo di una paratia, il pedale originale dell'acceleratore. NEW PASV viene disinserito in modo semplice e rapido grazie al perno installato sul pianale del veicolo, e la pedaliera del veicolo ritorna nelle condizioni di origine per consentire l'utilizzo da parte di un conducente normodotato.

L'acceleratore invertito a sinistra NEW PASV è realizzato con innumerevoli possibilità di regolazione, che gli permettono di adattarsi in modo semplice

ai veicoli con cambio automatico in commercio, assecondando al meglio le esigenze di guida dei conducenti. I materiali, alluminio ed acciaio, utilizzati per realizzare il dispositivo abbinati alla verniciatura a polvere di colore nero, gli conferiscono un aspetto piacevole e moderno, garantendone inoltre l'efficienza nel tempo. Anche NEW PASV come molti altri dei nostri dispositivi ha la peculiarità di poter essere trasferito dal vostro vecchio veicolo a quello appena acquistato

ACCELERATORE INVERTITO A SINISTRA ELETTRONICO

COD. HT - SPEED LEFT



L'acceleratore invertito a sinistra elettronico **HT-SPEED LEFT** riproduce fedelmente il funzionamento dell'acceleratore originale grazie ad una sofisticata centralina elettronica connessa all'impianto elettrico del veicolo. Premendo un pulsante, dopo l'accensione del veicolo, automaticamente si attiva il dispositivo che vi permette di accelerare in modo progressivo premendo il pedale posto alla sinistra del pedale del freno.

Quando **HT-SPEED LEFT** è attivo, l'acceleratore originale del veicolo viene disattivato elettronicamente non rendendo indispensabile la presenza di una paratia di sicurezza, anche se prevista dalla legge.



ACCELERATORE INVERTITO A SINISTRA

COD. NEW PASV

COD. COMUNITARI: 25.07 - 25.08



- Dispositivo universale
- Economico
- Installabile su ogni tipo di veicolo
- Utilizzo semplice ed intuitivo
- Regolabile meccanicamente
- Installazione semplice e veloce

PERCHÈ NEW PASV?

NEW PASV

- ✓ Facilmente asportabile
- ✓ Installazione semplice e veloce

ACCELERATORE INVERTITO A SINISTRA ELETTRONICO

COD. HT - SPEED LEFT

COD. COMUNITARI: 25.07 - 25.08

- Dispositivo universale
- Elettronica programmabile in base al modello di veicolo
- Sistema diagnostico integrato
- Utilizzo semplice ed intuitivo
- Sistema di protezione dai picchi di corrente
- Disattivazione in fase di frenata

PERCHÈ HT-SPEED LEFT?

HT-SPEED LEFT

- ✓ Pedale sinistro facilmente asportabile
- ✓ Quando attivato il dispositivo inabilita il comando acceleratore originale



 **HandyTech**®

Marchio di **CARROZZERIA 71**srl
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it



Member of

Approved by

Production process
certified by

Certified company



Rivenditore autorizzato

