



ACCELERATORE MANUALE

COD. HT - TOUCH EVO



HT-TOUCH EVO è il primo sistema di accelerazione applicato al pollice del conducente, posizione rivoluzionaria che permette di sfruttare al meglio la grande sensibilità del dito sul quale viene applicato. La pressione applicata sul leveraggio del dispositivo usando come contrasto il volante, la parte terminale della leva freno o il dito indice, vi garantisce una accelerazione graduale in ogni condizione di guida. Il dispositivo vi permette di accelerare grazie ad una variazione di campo magnetico, amplificata per mezzo di una centralina elettronica interfacciata all'impianto del veicolo. La variazione di campo magnetico, generata dal movimento del comando non essendo di tipo meccanico, aumenta notevolmente la durata nel tempo del dispositivo.

HT-TOUCH EVO è attivato, successivamente all'accensione del veicolo, premendo un pulsante che ha il compito di attivare la parte elettronica del dispositivo, la quale è stata realizzata per interfacciarsi con le diverse centraline elettroniche dei veicoli senza alterarne le caratteristiche funzionali, Cruise Control e Kick Down. Per meglio gestire il Touch durante i primi utilizzi e nelle fasi di guida più complesse, è possibile, per mezzo di un interruttore, attivare la funzione Park che riduce di circa il 50% l'accelerata, aumentando la capacità di gestione del dispositivo. Durante i periodi di inutilizzo del dispositivo o durante l'utilizzo del veicolo da parte di un conducente normodotato è possibile asportare il comando, semplicemente estraendo il connettore dalla scatola di derivazione.


Le caratteristiche innovative, funzionali e tecniche di **HT-TOUCH EVO** ci hanno permesso di brevettarlo rendendolo ancora di più un prodotto unico ed esclusivo. Il dispositivo come tutti i nostri sistemi di accelerazione ha la possibilità di essere trasferito da un vecchio ad un nuovo veicolo.

ACCELERATORE MANUALE

COD. HT - TOUCH EVO
COD. COMUNITARI: 25.04 - 25.06




- Innovativo
- Impatto estetico ridotto
- Comando senza usura meccanica
- Installazione semplice senza modifiche al veicolo
- Sensibilità del dispositivo programmabile
- Elettronica programmabile in base al modello di veicolo
- Sistema diagnostico integrato
- Utilizzo semplice ed intuitivo
- Sistema park
- Sistema di protezione dai picchi di corrente
- Disattivazione dispositivo in fase di frenata

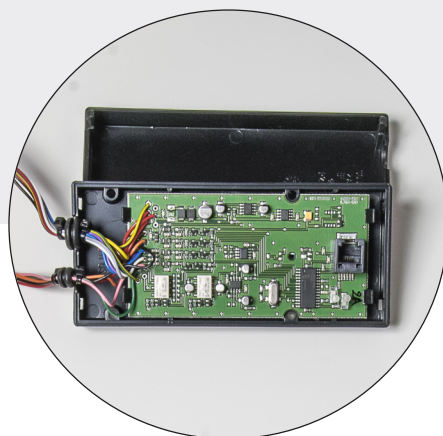

PERCHÈ HT-TOUCH EVO?

- ✓ Preserva i sistemi di sicurezza del veicolo
- ✓ Dispositivo brevettato
- ✓ Non è necessario ricaricare il dispositivo
- ✓ Comando facilmente asportabile.

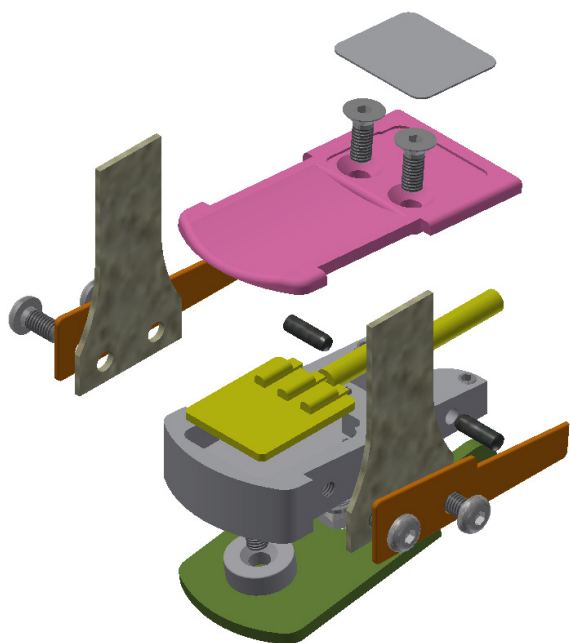

HandyTech®

Marchio di **CARROZZERIA 71srl**
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it



Member of

Approved by

Production process
certified by

Certified company

EMG
European mobility group

Motability
Improving our world by making it accessible

MIT
Production of accessible
products for disabled people

RiRA
Rivenditori autorizzati

Rivenditore autorizzato