



ACCELERATORI A CERCHIELLO

sopra volante / sotto volante

COD. HT-SPEED UP / HT-SPEED DOWN



I movimenti di spinta **HT-Speed Up** e trazione **HT-Speed Down** verso il volante dei dispositivi di accelerazione, consentono di effettuare una accelerata graduale. Il design innovativo, le quattro colorazioni disponibili dei rivestimenti in pelle abbinati al colore nero opaco del dispositivo e le due possibili colorazioni Silver o Black delle placche di finitura permettono di integrare il dispositivo ai sempre più moderni e tecnologici interni dei veicoli. Grazie alle svariate possibilità di regolazione del dispositivo l'installazione è possibile sui volanti che equipaggiano i diversi veicoli in commercio.

La parte elettronica del dispositivo (sviluppata dall'azienda francese SOJADIS), attivata tramite un pulsante, è stata concepita per interfacciarsi alle diverse tipologie di impianti elettrici originali dei veicoli, mantenendo inalterato il funzionamento dell'acceleratore originale e del sistema di Cruise Control, ove presente.

Il pulsante di assistenza al parcheggio abbinato all'attivazione automatica, con acceleratore a cerchio completamente tirato, della funzione kick-down originale, rendono il sistema unico nel suo genere, assecondando al meglio le esigenze di guida di ogni utilizzatore. Con la stessa cura dedicata agli aspetti estetici e alla parte elettronica, è stata sviluppata la parte funzionale del dispositivo, permettendo di mantenere inalterate le caratteristiche di sicurezza di serie dei veicoli, quali air bag, regolazioni del volante e comandi supplementari sul volante.

In caso di acquisto di un nuovo veicolo, essendo il dispositivo di tipo standard, è possibile trasferirlo, riportando l'auto di provenienza del dispositivo nelle condizioni originali.


ACCELERATORI A CERCHIELLO

sopra volante / sotto volante

COD. HT-SPEED UP / HT-SPEED DOWN
COD. COMUNITARI: 25.04 - 25.06




- Impugnatura ergonomica rivestita in pelle
- Adattabile ai diversi tipi di volanti
- Lascia libera la parte superiore del volante (HT-Speed Down)
- Installazione semplice
- Rivestimento in pelle disponibile in quattro colorazioni
- Elettronica programmabile in base al modello di veicolo
- Utilizzo semplice ed intuitivo
- Sistema park
- Sistema di protezione dai picchi di corrente
- Disattivazione in fase di frenata
- Spegnimento automatico

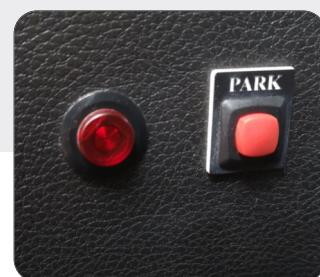

PERCHÈ HT-SPEED UP O HT-SPEED DOWN?

- ✓ **Preservano i sistemi di sicurezza del veicolo**
- ✓ **Sistema diagnostico integrato**
- ✓ **Non è necessario ricaricare il dispositivo**
- ✓ **Adattabile ai diversi tipi di volanti**

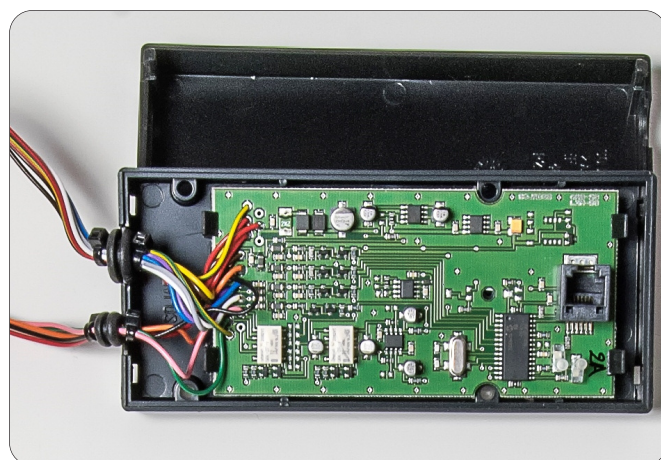

 **HandyTech**®

Marchio di **CARROZZERIA 71**srl
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it



Member of

Approved by

Production process
certified by

Certified company



Rivenditore autorizzato

